



## TOALLITAS OFTÁLMICAS

Para la limpieza diaria ocular de párpados, pestañas y borde palpebral

Medical device

Oftaclean es una toallita suave de un solo uso de un material no tejido cuyos componentes hidratan y limpian los párpados y las pestañas.

Oftaclean está indicado para la limpieza diaria completa de la delicada zona periocular.

El uso de Oftaclean resulta particularmente adecuado en la limpieza de la zona periocular en caso de inflamaciones del borde palpebral.

### Composición:


Gel de carragenina (*Ahnfeltia concinna*, gel); dimetilsiloxano copoliol; cocoil polipéptido de soja; coloruro de sodio; caprilil/capril glucósido; alcohol difeniletílico; metilo p-hidroxibenzoato de sodio; propil p-hidroxibenzoato de sodio; agua depurada.

### MODO DE USO:


#### Limpieza diaria de los ojos:

Con las manos limpias, abra el sobre y extraiga la toallita. Despliegue completamente la toallita y pásela con delicadeza por el borde del párpado y por las pestañas manteniendo el ojo cerrado.

**En caso de secreciones persistentes**, inflamación del borde palpebral (conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, orzuelos) y oclusiones del conducto lagrimal, es preferible aplicar como compresa caliente y húmeda en la zona afectada. Para ello, caliente el sobre sumergiéndolo aún sellado durante 3-5 minutos en agua templada (40 °C). Tras haberlo calentado, abra el sobre, extraiga la toallita y, manteniéndola plegada, masajee con delicadeza la zona afectada durante 1-2 minutos manteniendo el ojo cerrado.

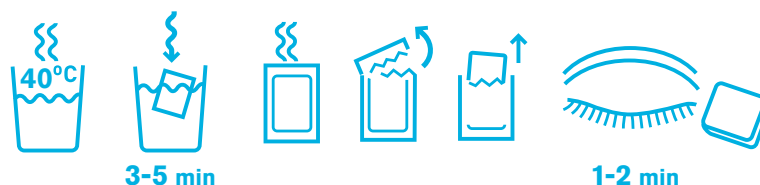

**En caso de picor o hinchazón de los párpados**, aplicar como compresa fría en la zona afectada para conseguir un efecto descongestionante. Para ello, enfríe el sobre en el frigorífico al menos durante una hora. Abra el sobre y aplique la toallita manteniéndola plegada en la zona afectada durante 1-2 minutos, procurando mantener el ojo cerrado.

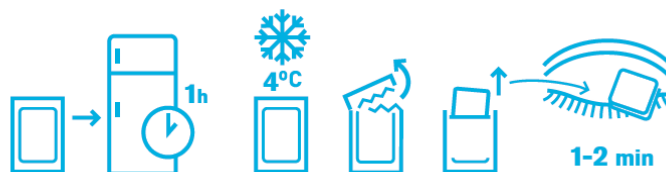

**Presentación:** 30 toallitas de un solo uso.

### Precauciones y advertencias:

- No utilizar si el sobre está dañado.
- No utilizar en caso de sensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- No utilizar tras la fecha de caducidad indicada en el producto.
- No aclarar después de su uso.
- Para usar como compresas calientes o frías, utilice la toallita según lo indicado en el modo de uso.
- La toallita, una vez calentada, se debe utilizar como compresa en pocos minutos o debe desecharse.
- Producto de uso únicamente externo.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Conservar a menos de 25 °C.
- No congelar.

**Distribuido en España por:**  
**Esteve Pharmaceuticals, S.A.**  
Passeig de la Zona Franca, 109  
08038 Barcelona, España  
www.esteve.com

**Fabricante:** Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 56121 Pisa, Italy  
**Fecha de la última versión del texto:** Enero 2017



912499/00 - IDG 11/13

**ESTEVE**

EX2728-17-01