



Aquoral LIPO

SOLUCIÓN OFTÁLMICA LUBRICANTE ANTIOXIDANTE

Aquoral Lipo es una solución oftálmica lubricante y antioxidante sin conservantes a base de sal sódica de ácido hialurónico cross-linkado, liposomas y crocina.

El ácido hialurónico cross-linkado es una forma reticulada del ácido hialurónico para aumentar la viscoelasticidad y la estabilidad de la molécula, garantizando una mejor hidratación y un mayor tiempo de permanencia sobre la superficie ocular.

Gracias a la combinación de ácido hialurónico cross-linkado con liposomas, Aquoral Lipo está indicado para todos los tipos de sequedad ocular ocasionados por insuficiente producción de película lagrimal (hipolacrimia) o excesiva evaporación de la película lagrimal (dislacrimia).

La actividad antioxidante de la crocina ayuda a prevenir el daño en la superficie ocular causado por los radicales libres producidos en caso de:

- sequedad ocular,
- estrés mecánico (procedimientos diagnósticos y quirúrgicos oftalmológicos, traumatismos oculares),
- estrés ambiental (aire acondicionado, aire seco o contaminado, temperaturas ambientales elevadas, etc.),
- estrés visual (uso prolongado del ordenador, condiciones lumínicas desfavorables, etc.).

Indicaciones:

Tratamiento sintomático del síndrome del ojo seco.

Indicado también para la protección corneal como sustituto lagrimal tras intervenciones quirúrgicas, traumatismos oculares o en casos de estrés ambiental o visual.

El producto puede emplearse con lentes de contacto aplicadas.

Modo de uso:

Instilar una o dos gotas en cada ojo, una o varias veces al día o según la prescripción médica.

Composición:

Sal sódica de ácido hialurónico cross-linkado 0,15 %, liposomas, crocina, sal disódica de EDTA, solución isotónica tamponada pH 7,2 c. s. p. 100 ml.

Advertencias:

- Lavar cuidadosamente las manos antes de utilizar el producto.
- No utilizar el producto en caso de alergia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes.
- Cerrar bien el frasco después del uso.
- No utilizar el producto transcurridos 60 días desde su apertura.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el frasco.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- No ingerir.
- No utilizar el producto si el envase no está en perfecto estado.
- En caso de reacciones adversas, interrumpir el uso del producto y consultar con un médico.
- Instilar el producto con cuidado para que la punta del frasco no llegue a tocar el ojo.

10 ml

Distribuido en España por:

Esteve Pharmaceuticals, S.A.

Passeig de la Zona Franca, 109

08038 Barcelona, España

www.esteve.com

 **Omisan** farmaceutici
via Galilei, Guidonia M. (RM) Italia
www.omisan.com

Fecha de la última revisión del texto: Junio 2016


0051

STERILE A



Desechar de forma adecuada
después de su uso

ESTEVE

EX3652-19-01