

20 TOALLITAS OFTÁLMICAS

de un solo uso con LIPOZONEYE®

Específico para la prevención de infecciones en el área periocular en adultos y niños

PRODUCTO SANITARIO

OZONest®

Qué es **OZONEST®** Toallitas y para qué se utiliza:

OZONEST® Toallitas oftálmicas, es un Producto Sanitario utilizado para una eficaz eliminación mecánica de secreciones, tanto lipídicas como secas, de residuos celulares y otros contaminantes de párpados y pestañas, que se liberan durante estados inflamatorios como blefaritis, blefaroconjuntivitis, orzuelos, chalaziones o en caso de trauma en el área periocular.

OZONEST® Toallitas, además, gracias al aceite ozonizado y a los liposomas, promueve la disgregación del biofilm, un mecanismo de defensa natural que las bacterias forman a lo largo de los márgenes de los párpados. La acumulación del biofilm puede causar y empeorar la inflamación y los procesos infecciosos que afectan a los párpados. En consecuencia, eliminar el biofilm ayuda a reducir los síntomas inflamatorios causados por la acción de las mismas bacterias.

La eliminación de estas secreciones y del biofilm de los párpados y de las pestañas es también útil antes y después de la cirugía ocular, ya que previene y reduce el riesgo de infecciones postoperatorias causadas por la proliferación de microorganismos.

INDICACIONES

OZONEST® Toallitas está indicado:

- para blefaritis y blefaroconjuntivitis, tanto infecciosas como alérgicas, orzuelos y chalaziones, para eliminar secreciones de párpados y pestañas, proporcionando así alivio de los síntomas.
- antes y después de la cirugía oftálmica, para reducir infecciones causadas por bacterias presentes en los párpados y pestañas.

Debido a la alta tolerabilidad de sus componentes, **OZONEST®** Toallitas puede utilizarse a diario en la protección del área periocular.

COMPOSICIÓN

Toallita de tejido no tejido bañada en una solución que contiene: LipozonEye® (Aceite vegetal ozonizado sin conservantes, Liposomas), Hidroxipropilmetilcelulosa, Ácido bórico, Tetraborato de sodio, PHMB, Agua purificada.

MODO DE USO

Después de limpiar sus manos adecuadamente, abra el sobre y extraiga la toallita. Pásela con delicadeza sobre el área del párpado, realizando ligeros movimientos circulares, para permitir la eliminación adecuada de las secreciones oculares y cualquier otro depósito (partículas contaminantes, polvo, etc.). En el caso de secreciones difíciles de eliminar o de inflamación que afecte el borde del párpado (blefaritis, blefaroconjuntivitis, orzuelos, chalaziones) se recomienda calentar el sobre cerrado durante unos minutos en agua tibia (40°), y posteriormente utilizar la toallita como compresa tibia. En caso de inflamación de los párpados, se aconseja enfriar el sobre cerrado en el frigorífico durante al menos una hora, y posteriormente aplicar la toallita durante unos minutos sobre los párpados cerrados.

ADVERTENCIAS

Utilice una toallita para cada ojo. Mantener fuera del alcance de los niños. Suspenda el tratamiento en caso de irritación evidente o hipersensibilidad al producto. La funcionalidad y seguridad del producto están garantizadas exclusivamente por la integridad del embalaje. Siga cuidadosamente las instrucciones de su médico. Nunca reutilice la misma toallita, deséchela inmediatamente después de su uso. Uso externo. Desechar adecuadamente después de su uso. Antes de su utilización, lea detenidamente las instrucciones de uso.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

ENVASE

Caja con 20 toallitas de tejido no tejido de un solo uso.

USO EXTERNO

ESTEVE

Distribuido en España por:
Esteve Pharmaceuticals, S. A.
Passeig de la Zona Franca, 109
08038 Barcelona
www.esteve.com

 **FB VISION S.p.A.**

Via San Giovanni Scafa
San Benedetto del Tronto
(AP) – Italy

EX4126-23-02
OZNT_esF000323


NO
REUTILIZAR




35°C
5°C




Desechar de
forma adecuada
después de su uso

Rev. 02/2021