

# CALMIX®

## Calciumhydroxidpaste

### Gebrauchsanweisung

#### Anwendungszweck

Zur Unterfüllung von Kavitäten, zum Schutz der Pulpa, als temporäre Wurzelkanaleinlage für die Zeit zwischen endodontischen Eingriffen und als Pulpaüberkappung.

#### Anwendungsgebiete

- Temporäre Wurzelkanalfüllung
- Exsudatmanagement
- Große periapikale Läsionen
- Interne/externe Resorption
- Perforationen
- Offener Apex zur Induktion einer Apexifikation
- Wurzelfraktur, wenn eine endodontische Behandlung des koronalen Fragments erforderlich ist, um die Bildung von Hartgewebe im koronalen Fragment an der Bruchlinie zu induzieren
- Pulpaschutz in tiefen Kavitäten
- Pulpaüberkappung und Pulpotomien

#### Gegenanzeigen

CALMIX® darf nicht bei Patienten angewendet werden, die überempfindlich auf Polyethylenglycol- oder Zirkonium-Verbindungen reagieren.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Aufgrund des hohen pH-Wertes kann CALMIX® zu Reizungen führen.
- Bei versehentlichem Kontakt mit Haut oder Augen sofort überschüssiges Material mit Mull oder Watterollen entfernen. Den Bereich mit Wasser oder Kochsalzlösung spülen.
- Bei Auftreten einer Verätzung und/oder Reizung einen Arzt aufsuchen.
- Bei versehentlichem Verschlucken mindestens 500 ml Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.
- Die Applikationsspritze muss nach jedem Gebrauch wieder fest mit der Luer-Lock-Kappe verschlossen werden.
- Für Kinder ist CALMIX® unzugänglich aufzubewahren.
- CALMIX® darf nicht in Verbindung mit Glycerol oder einem verwandten Molekül wie Propylenglycol verwendet werden, da es unter den alkalischen Bedingungen von CALMIX® zu einer Polymerisation und damit zu einer Aushärtung kommen könnte.

#### Produktanwendung

1. Die Luer-Lock-Kappe entfernen und die entsprechende Applikationskanüle in das Luer-Lock-Ende der Applikationsspritze einführen. Vor intraoraler Anwendung den Fluss der Paste durch die Spritze und die Kanüle testen. Den Spritzenkolben niemals mit Gewalt betätigen.
2. Füllen Sie den Kanal vom apikalen Teil des Wurzelkanals nach oben zur koronalen Mündung hinauf. Halten Sie die Applikationsspitze immer locker im Kanal. Die Kunststoffkanülen so positionieren, dass sie nicht zu eng im Kanal sitzen.
3. Alternativ geben Sie eine kleine Menge auf einen Anmischblock oder eine Glasplatte. Verwenden Sie einen Lentulo, um eine kleine Menge der Paste aufzunehmen, die dann in den Wurzelkanal hineingedreht wird, bis sie bis auf 2 mm an den Apex heran oder die Arbeitslänge reicht. Dies sollte wiederholt werden, bis der Kanal vollständig mit Paste gefüllt ist.
4. Wenn CALMIX® zur Unterfüllung von Kavitäten, zur Pulpaüberkappung oder zur Pulpotomie verwendet wird, kann ein Handinstrument wie z. B. ein Applikator verwendet werden, um die Paste auf den Kavitätenboden oder freiliegend aufzutragen.
5. Alle Instrumente, welche in Verbindung mit CALMIX® verwendet wurden, sollten sofort nach Gebrauch gereinigt werden. Dabei sollte zunächst überschüssiges Material mit einem trockenen Mulltuch entfernt werden. Anschließend sollte sofort eine weitere Reinigung und Entfernung von überschüssigem Material mit einem Mulltuch erfolgen, das mit einem Alkoholpräparat (z. B. mit mindestens 70 % Ethanol oder 60 % Isopropanol) angefeuchtet wurde.

Die Produktanwendung darf nur durch einen Zahnarzt und in Übereinstimmung mit der Packungsbeilage erfolgen.

#### Lagerung

Kühl und trocken lagern (5 °C bis 25 °C).

#### Inhalt der Packung

- 1 × 1,5 ml Applikationsspritze
- 5 × Applikationskanülen


## Hersteller, Vertreiber, EU-Bevollmächtigter

### Hersteller



Ozdent Pty Ltd  
Unit 12,6 Gladstone Road  
Castle Hill NSW, Australien 2154.

**Bevollmächtigter in der EU** Annette Callaghan Ltd  
Lee View House, South Terrace  
Cork, Ireland

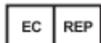


### Vertrieb

Esteve Pharmaceuticals GmbH  
Hohenzollerndamm 150-151  
14199 Berlin  
Deutschland  
Phone +49 30 338427-0  
e-mail info.germany@esteve.com

Stand der Information: Januar 2022



Hersteller

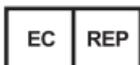

Bevollmächtigter in der  
Europäischen Gemeinschaft



Charge



verwendbar bis



Temperaturbegrenzung



Achtung!  
Gebrauchsanweisung beachten



vor Sonnenlicht schützen



Trocken aufbewahren



nicht wiederverwenden



mit Vorsicht behandeln



Ätzend

CE 0123

ESTEVE